

Маример

бебі®

Інструкція із застосування

Спрей назальний ізотонічний МАРИМЕР бебі®

Спрей назальний ізотонічний МАРИМЕР бебі® - натуральний продукт, який є стерильним фізіологічним розчином морської води з мікродифузною системою впорскування.

Від природи збагачений мінеральними солями та морськими мікроелементами, **спрей назальний ізотонічний МАРИМЕР бебі®** рекомендовано для немовлят та дітей молодшого віку для щоденного очищення носових ходів та зволоження слизової оболонки носа при сухості.

Мікродифузна система впорскування в **спреї назальному ізотонічному МАРИМЕР бебі®** полегшує промивання носових ходів.

Спеціальна захисна насадка сприяє безпечному застосуванню спрею новонародженим.

Спрей назальний ізотонічний МАРИМЕР бебі® можна застосовувати у будь-якому положенні тіла.

Належна гігієна носа допомагає захищати слизові оболонки від несприятливих факторів зовнішнього середовища (холодні погодні умови, алергени, сухе або забруднене повітря тощо) та забезпечує нормальне дихання носом. Немовлята у віці до 6 місяців дихають тільки через ніс.

СКЛАД

100% стерильний ізотонічний розчин морської води, що еквівалентно солі 9 г/л.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Спрей назальний ізотонічний МАРИМЕР бебі® рекомендується для немовлят та дітей молодшого віку:

- для щоденної гігієни носових ходів;
- для зволоження слизової оболонки носа при сухості;
- як додаткова складова при захворюваннях ЛОР-органів.

ДОЗУВАННЯ


1 впорскування у кожен носовий хід, бажано перед кожним прийомом їжі, 1-4 рази на добу, за потребою. **Спрей назальний ізотонічний МАРИМЕР бебі®** можна застосовувати щодня протягом тривалого періоду.

Пояснення символів, що застосовуються

 **Laboratoires Gilbert**
928, Avenue du General de Gaulle,
14200 Herouville Saint-Clair - FRANCE

Найменування та місцезнаходження
уповноваженого представника в Україні:
ТОВ «Фарма Стар»
Україна, 03124, м. Київ, бул. І. Лепсе, 6/8

 Вибронік  Партія

 Уважно прочитайте
інструкцію із
застосування

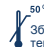
 Дата
виготовлення

 0459

 Дата закінчення
терміну придатності

 STERILE A

Стерильно

 50°C
Зберігати при
температурі не вище 50°C

 UA.TR.039



Laboratoires
GILBERT

CNOT 1065 - IS 667250NOT00 - NR. 09/2017