

# Маример®

## ізотонічний

 **Laboratoires Gilbert**  
928, Avenue du General de Gaulle,  
14200 Herouville Saint-Clair - FRANCE

Найменування та місцезнаходження  
уповноваженого представника в Україні:  
ТОВ «Фарма Старт»  
Україна, 03124, м. Київ, бул. І. Лєнсе, 6.8

## Інструкція із застосування

**Спрей назальний ізотонічний МАРИМЕР®** - натуральний продукт, який є стерильним фізіологічним розчином морської води з системою мікродифузного впорскування. Від природи збагачений мінеральними солями та морськими мікроелементами, **спрей назальний ізотонічний МАРИМЕР®** рекомендовано для дітей та дорослих для щоденного очищення носових ходів, особливо при сухості слизової оболонки чи ускладненому носовому диханні.

Мікродифузна система впорскування у **спрей назальний ізотонічний МАРИМЕР®** забезпечує м'яке промивання носових ходів.

**Спрей назальний ізотонічний МАРИМЕР®** можна застосовувати у будь-яких положеннях. Належна гігієна носа допомагає захищати слизові оболонки від несприятливих факторів зовнішнього середовища (холодні погодні умови, алергени, сухе або забруднене повітря тощо) та забезпечує нормальне дихання носом.

### СКЛАД

100 % стерильний ізотонічний розчин морської води, що еквівалентно солі 9 г/л.



Виробник



Партія



Дата виготовлення



Дата закінчення терміну придатності



Зберігати при температурі не вище 50°C

### ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

**Спрей назальний ізотонічний МАРИМЕР® рекомендується:**

- для щоденної гігієни носових ходів;
- для зволоження слизової оболонки носа при сухості;
- як додаткова складова при захворюваннях ЛОР-органів.

### ДОЗУВАННЯ

1 впорскування у кожен носовий хід, 1-4 рази на добу, за потребою.

**Спрей назальний ізотонічний МАРИМЕР®** можна застосовувати щодня протягом тривалого періоду.

### ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- Нахиліть голову вбік.
- Вставте насадку у ніздрю та вприсніть **спрей назальний ізотонічний МАРИМЕР®** у верхній носовий хід.
- Повторіть процедуру з іншим носовим ходом.
- Поверніть голову у вихідне положення, щоб дати носовим виділенням витекти, потім видаліть залишки розчину серветкою або звільніть ніс від носових виділень.

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

Дозуючий пристрій слід очищати мильним водним розчином після кожного застосування.  
Промити та витерти.

## Спрей назальний ізотонічний МАРИМЕР®

### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не застосовувати недоношеним дітям.

### УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Застереження. Флакон під тиском: може лопнути при нагріванні. Тримайте подалі від джерел тепла, іскор, відкритого полум'я, гарячих поверхонь та будь-яких інших джерел запалювання. Курити заборонено в безпосередньої близькості з флаконом. Не проколювати та не спалювати навіть після використання. Захищати від сонячних променів.

Зберігати при температурі не вище 50°C.

**Зберігати поза полем зору та в недоступному для дітей місці.**

**Не використовувати після дати закінчення терміну придатності, що вказана на флаконі.**



Уважно прочитайте інструкцію із застосування



0459



Стерильно



UA.TR.039



Laboratoires  
**GILBERT**