

# Маример®

## гіпертонічний

## Інструкція із застосування

Спрей назальний гіпертонічний **МАРИМЕР®** - натуральний продукт, який є гіпертонічним розчином морської води з мікродифузною системою впорскування. Від природи збагачений мінеральними солями та морськими мікроелементами, спрей назальний гіпертонічний **МАРИМЕР®** рекомендовано для дітей та дорослих для очищення та розблокування закладених носових ходів, у тому числі при застуді, синуситі та післяопераційному догляді.

Мікродифузна система впорскування **МАРИМЕР®** та механічний ефект гіпертонічного водного розчину полегшують промивання носових ходів. Процедура очищення носа захищає слизові оболонки від зовнішніх загроз та забезпечує нормальне дихання носом.

### СКЛАД

100 % гіпертонічний розчин морської води, що еквівалентно солі 22 г/л (g/l).

### ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Спрей назальний гіпертонічний **МАРИМЕР®** рекомендується:

- для очищення носових ходів,

- для розблокування закладеного носа,
- як додаткова складова при захворюваннях ЛОР-органів.

### ДОЗУВАННЯ

По 1-2 впорскування у кожен носовий хід, 1-3 рази на добу, за потребою.

### ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- Нахиліть голову вбік.
- Вставте насадку у ніздрю та вприсніть спрей назальний гіпертонічний **МАРИМЕР®** у верхній носовий хід.
- Повторіть процедуру з іншим носовим ходом.
- Поверніть голову у вихідне положення, щоб дати носовим виділенням витекти, потім видаліть залишки розчину серветкою або звільніть ніс від носових виділень.

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

Дозуючий пристрій слід очищати мильним водним розчином після кожного застосування. Промити та витерти.

### НЕПЕРЕДБАЧУВАНІ НАСЛІДКИ

На початку застосування можливе відчуття поколювання або подразнення, що минає.

## Спрей назальний гіпертонічний **МАРИМЕР®**

### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не застосовувати недоношеним дітям. Особам, які страждають на захворювання, що ускладнюють дихання (наприклад, астма), слід проконсультуватися з лікарем. Не можна використовувати особам із підвищеною чутливістю до морської води.

### УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Застереження. Флакон під тиском: може лопнути при нагріванні. Тримайте подалі від джерел тепла, іскор, відкритого полум'я, гарячих поверхонь та будь-яких інших джерел запалювання. Курити заборонено в безпосередньої близькості з флаконом. Не проколювати та не спалювати навіть після використання. Захищати від сонячних променів. Зберігати при температурі не вище 50°C.

Зберігати поза полем зору та в недоступному для дітей місці.

Не використовувати після дати закінчення терміну придатності, що вказана на флаконі.



Ознайомтесь з інструкцією для застосування.



Виробник



Партія



Дата виготовлення



Дата закінчення терміну придатності



50°C  
Зберігати при температурі не вище 50°C



Laboratoires GILBERT