

Інструкція із застосування

Спрей назальний ізотонічний МАРИМЕР® - натуральний продукт, який є фізіологічним розчином морської води з системою мікродифузного впорскування. Від природи збагачений мінеральними солями та морськими мікроелементами, спрей назальний ізотонічний МАРИМЕР® рекомендовано для дітей та дорослих для щоденного очищення носових ходів, особливо при сухості слизової оболонки чи ускладненому носовому диханні.

Мікродифузна система впорскування у спреї назальному ізотонічному МАРИМЕР® забезпечує м'яке промивання носових ходів. Спрей назальний ізотонічний МАРИМЕР® можна застосовувати у будь-яких положеннях. Належна гігієна носа допомагає захищати слизові оболонки від несприятливих факторів зовнішнього середовища (холодні погодні умови, алергени, сухе або забруднене повітря тощо) та забезпечує нормальне дихання носом.

СКЛАД

100 % ізотонічний розчин морської води, що еквівалентно солі 9 г/л (g/l).

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ



Виробник



Лот



Дата виготовлення

Спрей назальний ізотонічний МАРИМЕР® рекомендується:

- для щоденної гігієни носових ходів;
- для зволоження слизової оболонки носа при сухості;
- як додаткова складова при захворюваннях ЛОР-органів.

ДОЗУВАННЯ

1 впорскування у кожен носовий хід, 1-4 рази на добу, за потребою.

Спрей назальний ізотонічний МАРИМЕР® можна застосовувати щодня протягом тривалого періоду.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- Нахиліть голову вбік.
- Вставте насадку у ніздрю та вприсніть спрей назальний ізотонічний МАРИМЕР® у верхній носовий хід.
- Повторіть процедуру з іншим носовим ходом.
- Поверніть голову у вихідне положення, щоб дати носовим виділенням витекти, потім видаліть залишки розчину серветкою або звільніть ніс від носових видіlenь.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

Дозуючий пристрій слід очищати мильним водним розчином після кожного застосування.

Промити та витерти.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ



Дата закінчення терміну придатності



Зберігати при температурі не вище 50°C

Спрей назальний ізотонічний МАРИМЕР®

Не застосовувати недоношеним дітям.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Застереження. Флакон під тиском: може лопнути при нагріванні. Тримайте подалі від джерел тепла, іскор, відкритого полум'я, гарячих поверхонь та будь-яких інших джерел запалювання. Курити заборонено в безпосередній близькості з флаконом. Не проколювати та не спалювати навіть після використання. Захищати від сонячних променів.

Зберігати при температурі не вище 50°C.

Зберігати поза полем зору та в недоступному для дітей місці.

Не використовувати після дати закінчення терміну придатності, що вказана на флаконі.



Ознайомтесь з інструкцією для застосування.



0459



Laboratoires
GILBERT