



Інструкція із застосування

Ізотонічний розчин МАРИМЕР® – натуральний продукт, який є стерильним ізотонічним розчином морської води. Від природи збагачений мінеральними солями та морськими мікроелементами, ізотонічний розчин МАРИМЕР® рекомендовано для немовлят, дітей та дорослих для щоденного очищення носових ходів, особливо при сухості слизової оболонки носа чи ускладненому носовому диханні. Належна гігієна носа допомагає захищати слизові оболонки від несприятливих факторів зовнішнього середовища (холодні погодні умови, алергени, сухе або забруднене повітря тощо). З гігієнічною метою, кожен флакон-крапельницю використовувати одноразово.

СКЛАД

100 % стерильний ізотонічний розчин морської води, що еквівалентно солі 9 г/л (g/l).

УПАКОВКА

10 флаконів-крапельниць по 5 мл (ml).

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Ізотонічний розчин МАРИМЕР® підходить немовлятам для закапування у ніс або промивання.

- для щоденної гігієни носових ходів;
- для полегшення видалення слизу при ускладненому носовому диханні;
- як додаткова складова при захворюваннях ЛОР-органів.

ДОЗУВАННЯ

З гігієнічною метою: 1-4 рази на добу в кожен носовий хід.

З лікувальною метою: 4-6 раз на добу по мірі необхідності, перед використанням інших процедур.

Пояснення символів, що застосовуються



Зберігати при температурі від 15 до 30°C



Уважно прочитайте інструкцію із застосування



Повторно використовувати заборонено

Дата виготовлення



Виробник



Партія



Дата закінчення терміну придатності



0459



Не призначений для застосування у вигляді ін'єкцій



Стерильно

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ.

Одноразовий флакон-крапельниця простий і безпечний у використанні. Флакон відкривається поворотом насадки, яка повністю відокремлюється.

Використовувати для закапування або промивання.

- Дитина повинна спочатку висякатися через ніс, по одній ніздрі за раз.
- Немовлятам рекомендується виконувати промивання у положенні лежачи, сидячі або стоячи, повернувши голову дитини набік.
- Ввести кінчик у ніздрю та злегка натиснути на флакон.
- Повторити процедуру для іншої ніздрі.
- Підняти голову дитини так, щоб слиз міг вилитись, потім витерти надлишок.
- Уникати сякання немовля відразу після введення, щоб продовжити дію розчину.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ.

Немовлятам слід закапувати препарат з мінімальним тиском для запобігання ризику потрапляння розчину у середнє вухо.

ЗБЕРІГАТИ ПОЗА ПОЛЕМ ЗОРУ ТА В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.

Флакон-крапельниця призначений для одноразового застосування.

Не використовувати, якщо флакон-крапельниця відкритий або пошкоджений через ризик швидкого бактеріального забруднення.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ.

Зберігати при кімнатній температурі від 15 до 30°C.

Не застосовувати після дати закінчення терміну придатності, що вказана на флаконі-крапельниці.



Laboratoires Gilbert

928, Avenue du General de Gaulle,
14200 Herouville Saint-Clair – FRANCE

Лабораторії Жільбер

928, Авеню дю Женераль де Голь,
14200 Ерувіль Сент-Клер – ФРАНЦІЯ